

microson

MU-0030-001-ES -RevA 2013-09-13



mc-PAD

Printed in Spain

MANUAL DE USO

ES

Ref. 90238



MICROSON S.A.
Pere IV, 160
08005 BARCELONA, SPAIN
Tel. +34 93 300 58 00
www.microson.es



microson

¡Enhorabuena, bienvenido!

Usted ha adquirido un control remoto MICROSON dotado con la última tecnología digital.

Su control remoto es el resultado de años de investigación y desarrollo y está diseñado para que usted disfrute de los sonidos de la vida.

Nuestro equipo le agradece su confianza y le desea mucho éxito en su adaptación.

El equipo de Microson le agradece su confianza y le desea mucho éxito en su adaptación.

Es importante que lea y siga las instrucciones de este manual para evitarle lesiones o daños en su control remoto o audífono.

Este manual ha sido realizado según las normativas EN 1041 y EN 980.

Finalidad prevista	2
Indicaciones sobre la eliminación	2
Principios de funcionamiento	3
Descripción de símbolos	4
Instrucciones de seguridad	5
Descripción de su mando a distancia	6
Bloqueo / Desbloqueo	7
Control de volumen	8-9
Selección de memoria	10
Perímetro de funcionamiento	11
Batería	12
Mantenimiento y cuidado de su audífono	12
Condiciones ambientales de funcionamiento	12
Solución de posibles problemas	13

La finalidad prevista del control remoto es la de controlar a distancia las funciones básicas de sus audífonos. Su uso no está indicado para niños.

La finalidad prevista de los audífonos es la de amplificar selectivamente el sonido y transmitirlo al oído para compensar la audición a personas con discapacidad auditiva (hipoacúsicos).

La prescripción y adaptación de las ayudas auditivas y la sincronización de su control remoto, debe ser realizada por un profesional de la salud auditiva, que realizará la programación y ajuste específico para la pérdida auditiva y morfología de forma totalmente personalizada. Por lo tanto, utilizar audífonos o control remoto, no prescritos por un profesional o adaptados para otra persona, puede dañar su audición.

INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Este audífono no debe eliminarse por medio de la recogida de basuras doméstica.

Todos los usuarios están obligados a entregar los aparatos eléctricos o electrónicos en un punto de recogida selectiva de su ciudad o en el comercio especializado para la conservación, protección y mejora del medio ambiente.

Cuando acabe la vida útil de su audífono, entréguelo a su audioprotesista o en un punto de recogida selectiva con objeto de facilitar su tratamiento y reciclado.


En la Unión Europea, el equipo marcado esta cubierto por la Directiva 2002/96/CE del Parlamento europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003 sobre eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. Enmendada por la Directiva 2003/108/CEE (RAEE).



Este control remoto control permite un acceso sencillo a las diferentes funciones del audífono como el ajuste de volumen y los diferentes programas. Incorpora además un indicador visual luminoso que muestra su estado.

El mc-PAD basa su funcionamiento en la inducción magnética por campo cercano. Esta inducción se define como la vinculación de la energía magnética entre dos antenas inductivas, la orientación de las cuales puede variar el alcance del dispositivo.

Al tratarse de una inducción de baja frecuencia, es más difícil que su funcionamiento se vea afectado por interferencias externas de otros dispositivos consiguiendo así un funcionamiento fiable y preciso.

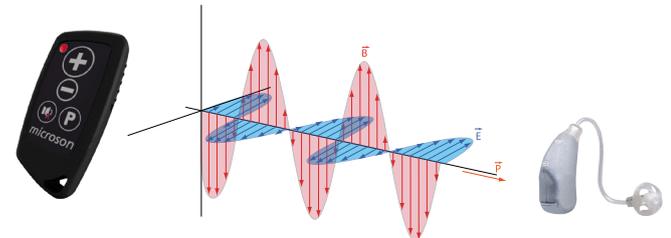



Este símbolo indica que es importante para el usuario prestar atención en situaciones o procedimientos en los que podría provocar lesiones, daño o alteración en el audífono o alguno de sus componentes.



Instrucciones de funcionamiento.

Indica que es importante para el usuario seguir los consejos y advertencias que contiene este documento.



Con el símbolo CE, Microson confirma que su control remoto cumple la Directiva Europea 93/42 CEE para productos sanitarios.



Este símbolo indica que los productos descritos en estas instrucciones de uso se adhieren a los requisitos establecidos para un componente de aplicación del tipo B de EN 60601-2-66. La superficie del sistema auditivo está catalogada como componente de aplicación del tipo B.



El símbolo de contenedor tachado indica que no debe deshacerse de su audífono mediante la basura doméstica. Debe entregarlo a su audioprotesista o en un punto de recogida selectiva de aparatos electrónicos para proteger la salud y el medio ambiente.



Este símbolo indica "mantener seco"

¡ADVERTENCIA!

- Tragarse las pilas es nocivo. Mantenerlas fuera del alcance de los niños.
- No utilice bajo ninguna circunstancia su control remoto, audífonos y accesorios en zonas con equipos médicos (tratamientos de Rayos X, alta frecuencia, resonancia magnética o terapia de onda corta).
- ¡No utilizar control remoto, audífonos o accesorios en zonas expuestas a peligro de explosión!


¡PRECAUCIÓN!

- Proteja su control remoto, audífonos y accesorios de la humedad y fuentes de calor.
- No utilice su control remoto, audífonos o accesorios si va a ducharse, bañarse o pulverizar su cabello.
- Evite que su control remoto, ayudas auditivas o los accesorios sufran golpes fuertes.
- No utilice nunca un microondas ni otros dispositivos emisores de calor para secar su control remoto, audífonos o accesorios.

INFORMACIÓN

- Bloquear control remoto si no va utilizarlo durante largo tiempo.
- Haga sustituir inmediatamente las pilas agotadas.
- ¡No tirar las pilas usadas a la basura! Entréguelas al audioprotesista para que sean eliminadas correctamente sin dañar el medioambiente.

mc-PAD

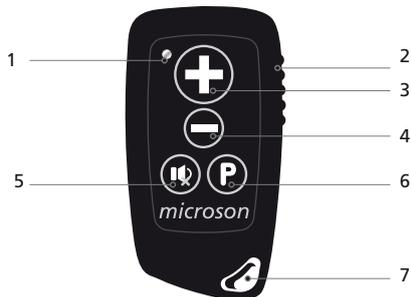

1. LED indicador de estado
2. Interruptor (Bloqueo/Desbloqueo)
3. Botón incremento de volumen
4. Botón disminución de volumen
5. Botón Mute (silencio)
6. Botón selección de memoria
7. Alojamiento para accesorio de transporte*

* No suministrado por el fabricante.

Su mando a distancia dispone de un interruptor lateral que permite (Bloquear/Desbloquear) las funciones del teclado.

Asegúrese de que está desbloqueado para su utilización.

BLOQUEAR:

Deslice el interruptor hacia abajo para bloquear el mando a distancia.

Se recomienda activar la función de bloqueo siempre que lo transporte, lo guarde, no vaya a utilizarlo y después de cada uso.

DESBLOQUEAR:

Deslice el interruptor hacia arriba para desbloquear el mando a distancia.

Al desbloquear el mando a distancia el LED indicador de estado emitirá un par de destellos luminosos verdes.



El mando a distancia permite el ajuste de volumen de su audífono pulsando los botones +/-.

Pulse el botón + para incrementar el volumen de su audífono en una fracción.

Al llegar al límite de su volumen, el audífono emitirá un pitido a modo de aviso.



Pulse el botón - para disminuir el volumen de su audífono en una fracción.

Al llegar al límite de su volumen, el audífono emitirá un pitido a modo de aviso.



Al pulsar el botón + o el botón -, el LED indicador de estado emitirá un destello luminoso verde.



SILENCIO

Para silenciar su audífono mediante el mando a distancia pulse el botón mute.



Al pulsar el botón mute, el LED indicador de estado emitirá un destello luminoso rojo.



Para reanudar de nuevo la amplificación pulse cualquier botón.

El LED indicador de estado emitirá un destello luminoso verde y el audífono volverá al estado de amplificación previo a la comanda mute.



El botón (P) permite seleccionar de forma cíclica entre las distintas memorias almacenadas en su audífono. Pulse el botón P para cambiar los programas de su audífono y encontrar el que mejor se adapte al ambiente en el que se encuentre.



Al pulsar el botón P, el LED indicador de estado emitirá un destello luminoso verde. Simultáneamente, su audífono reproducirá un sonido que permita identificar el número de memoria seleccionada.



1 Tono ♪	Memoria 1
2 Tonos ♪♪	Memoria 2
3 Tonos ♪♪♪	Memoria 3
4 Tonos ♪♪♪♪	Memoria 4


Su mando a distancia dispone de un alcance aproximado de 1 m. Siga el ejemplo de la ilustración para la correcta sincronización de su mando a distancia con sus audífonos.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

mc-PAD utiliza un sistema de inducción magnética que puede verse interferido por algunos agentes externos. Estas interferencias puede reducir el alcance efectivo del mando.

📖 INFORMACIÓN

No sobrepase la distancia efectiva de 80 cm para asegurarse un funcionamiento correcto.

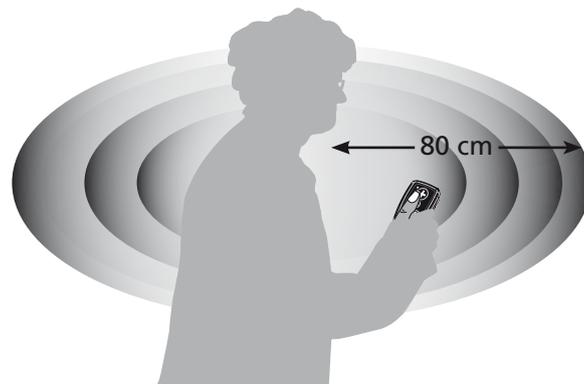

Su mando a distancia dispone de una batería interna, con una vida útil aproximada de 1 año. Acuda a su audioprotesista para que le realice el cambio de batería si fuera necesario.

⚠ !ADVERTENCIA!

No intente abrir su control remoto, el cambio de batería únicamente debe realizarlo un profesional autorizado.

Una manipulación indebida puede provocar daños en el control remoto y puede suponer la pérdida de garantía.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

⚠ ¡ATENCIÓN!

- No limpie su mando a distancia con alcohol, agua oxigenada o detergentes: utilice un paño suave humedecido.



¡No moje su mando a distancia!

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

Se recomienda, para un funcionamiento óptimo, utilizar sus ayudas auditivas dentro del rango de temperatura de 0 / 40 °C (grados Centígrados). Asimismo la humedad relativa, para su almacenamiento, no debería superar el 95%.

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El led indicador no se ilumina	Batería agotada	Consulte a su audioprotesista
	Mando bloqueado	Desbloquee su mando
El audífono no responde a las órdenes de su mando	Audífono desconectado	Conecte su audífono
	Fuera del perímetro de acción	Acerque su mando a los audífonos
	Mando bloqueado	Desbloquee su mando
	Batería agotada	Cambie la batería de su audífono Consulte a su audioprotesista
	Interferencias por otros sistemas	Compruebe a su alrededor que no exista ninguna fuente de radiación electromagnética

Atención al cliente
del Fabricante:



+34 93 300 58 00



helpdesk@micoson.es

📖 NOTA

Para cualquier otro problema o duda, contacte con su audioprotesista o distribuidor.